

港澳地區常問問題

1) 唾液不會傳染愛滋病，為甚麼Aware™ Oral能從唾液染出愛滋病?

答：當人體受到愛滋病病毒入侵，免疫系統就會產生愛滋病抗體來抵禦病毒。愛滋病抗體正是身體受愛滋病病毒感染的憑證。唾液不會傳染愛滋病，但是它含有愛滋病病毒抗體。Aware™ Oral只需要少量的唾液，便能夠有效地快速檢測測試者身體裡的愛滋病病毒抗體，適合自我檢測。

2) 測試前吸了煙，會影響檢測結果嗎?

答：不會!吸煙過後可以直接進行檢測，不會影響結果。

3) 飲食過後，會影響檢測結果嗎?

答：會! 請等待10分鐘後再進行檢測。

4) 我在檢測的時候不小心碰到試管裡的緩衝液，我會感染到愛滋病嗎?

答：不會!測試液是用來混合口水樣本作檢測之用，裡面不含愛滋病病毒。

5) 我有吸毒的習慣，因此口腔比較乾，會影響檢測嗎?

答：不會! Aware™ Oral只需要少量的唾液便能夠有效地快速檢測測試者身體裡的愛滋病病毒抗體。如你覺得口腔比較乾，可以將採集樣本的過程重覆1-2次便行!

6) 為甚麼醫院大多選擇驗血方式，而不用驗唾液方式來檢測試愛滋病?

答：主要因為成本問題。醫院大多選擇驗血方式，是因為血液檢測比唾液檢測成本便宜多。而且院方幫病人抽血一次後踮可以驗各種不同的病，大大減低了它們的成本和時間。因為沒有專業人在旁進行抽血是有受細菌感染的風險，我們鼓勵個人使用Aware™ Oral作自我檢測用途。

Aware™ Oral能在無需抽血、無痛楚情況下進行自我檢測，大大減少測試者的心理壓力，並能完全保障自己的私隱。因為產品極高的準確度，過程簡單和快捷，適合很多不適宜抽血的人仕(如小孩、肥胖人仕、吸毒者等)使用，很多先進國家之機構和醫院都已選用Aware™ 作為唾液檢測愛滋用途，詳情可瀏覽本公司的最新消息和其他分頁資料(www.DiagnosticBio.com)。

